



Lingettes Prodene Aseptil

Lingettes antiseptiques et désinfectantes



Lingettes antiseptiques et désinfectantes pour les mains, objets, surfaces et dispositifs médicaux de classe I.

Marchés cibles : milieu médical et paramédical, hôpitaux, centres de soins, laboratoires d'analyses, services urgences...

- ✓ **Multi-usages** : mains et surfaces
- ✓ **Large spectre d'activité** (bactéries, levures, virus)
- ✓ **Pratique** : 1^{ère} lingette tirée
- ✓ **Conçu et fabriqué en France**

Substances actives de la solution

- Ethanol CAS 64-17-5 (47 mg/g)
- Chlorure de benzalkonium CAS 85409-22-9 (3 mg/g)
- Acide D-gluconique CAS 18472-51-0 (1,2 mg/g)

Caractéristiques

- Non-tissé : viscosité blanche
- Odeur : mentholée
- pH :



pH (pur): 4.5 – 6.5

Conservation

- Conserver dans son emballage d'origine fermé et dans des conditions normales de stockage. Eviter les températures supérieures à 40 °C.
- Avant ouverture conservation 30 mois à l'abri de la chaleur, dans les conditions normales de températures.
- Dès l'ouverture, utiliser dans le mois.

Législation

- Produit Biocide TP1 and TP2
- Usage exclusivement professionnel.

Environnement

- Emballage recyclable
- Éliminer le contenu et le récipient dans un conteneur à déchets. Ne pas jeter le produit dans l'environnement.

Mode d'emploi

NB : L'utilisation des lingettes ne dispense pas du protocole de nettoyage (préalable à toute désinfection).



Tirer horizontalement une lingette imprégnée jusqu'à la prédécoupe.
Bien refermer le conditionnement après usage.



Frotter la lingette sur les mains et les surfaces préalablement nettoyées, pendant au moins 30s.
Utiliser plusieurs lingettes si nécessaire.



Ne pas rincer.
Laisser sécher.



Jeter les lingettes usagées dans un container à déchets.



Lingettes Prodene Aseptil

Lingettes antiseptiques et désinfectantes

Propriétés microbiologiques de la solution

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	▪ EN 1040	1 min
	▪ EN 1040 (SARM)	1 min
	▪ EN 1276*	30s
	▪ prEN 13727*	30s
	▪ EN 13727*	5 min
	▪ EN 13697*	5 min
	▪ EN 14561*	5 min
Levures / Moisissures	▪ EN 1275 (<i>Candida albicans</i>)	5 min
	▪ EN 13624 (<i>Candida albicans</i>)*	5 min
	▪ EN 13697 (<i>Candida albicans</i>)*	5 min
	▪ EN 1650+A1 (<i>Candida albicans</i>)*	1 min
	▪ EN 1650 (<i>Trichophyton mentagrophytes</i>)*	15 min
Virus	Actif sur	
	- H1N1 selon EN 14476+A1	30s
	- Herpes simplex 1, <i>Rotavirus</i> - BVDV (virus modèle de l'Hépatite C), PRV (virus modèle de l'Hépatite B), HIV	5 min 30s

*Etudes réalisées en conditions de propreté

SARM: *staphylocoque doré résistant à la méthicilline*

Précautions d'emploi

Ne pas avaler.

Ne pas utiliser avec d'autres produits.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Pour plus de renseignements se référer à la FDS du produit.

En cas d'urgence, contacter le centre antipoison le plus proche.

Conditionnement

Conditionnements	Code produit
12 boîtes de 100 lingettes Palette de 100 cartons	U1A84JI022
6 seaux de 450 lingettes Palette de 24 cartons	U1A10FM00G

Rev.: 0/05.10.2015

