

0712840

# FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®

## Manches PE-BD bleu translucide auto-adhésives pour blouse

- Sur-manches
- Matière : Polyéthylène Basse Densité
- Dispositif de serrage au poignet inclus
- Couleur : BLEU TRANSLUCIDE
- Dimensions : 25 x 64 + 7 cm de rabat adhésif
- Epaisseur : 35 µ
- Protège des salissures et éclaboussures



### Conditionnement

	Carton	Palette
Conditionnement	Carton de 800 unités	Palette de 60 cartons
Dimensions en cm	NC	80 x 120 cm
Code barre EAN 13	3221170020026	-

### Notice

1. Oter la protection de l'adhésif aux manches avant de les enfiler et de rabattre l'adhésif sur le haut des épaules.
2. Passer les bras par les ouvertures en haut de la surblouse.
3. Bien ramener toute la surblouse vers les épaules.
4. Ouvrir le passage de la tête et placer une main en haut et une en bas du passage.
5. Enfiler la surblouse en prenant soin de garder sous le menton la partie avant de la blouse afin de ne pas toucher le masque à l'enfilage.
6. Pour le déshabillage, déchirer depuis l'arrière en emportant ensuite les manches avec le tout.
7. Se servir des élastiques pour emballer la surblouse usagée et réduire les risques de contaminations.

Mode d'emploi à visionner → Flasher le QR code



Origine FRANCE

Code douanier 3926200000